



## Kit de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité VACUETTE® Mode d'emploi



### Utilisation

Le kit de prélèvement sanguin de sécurité **VACUETTE®** est utilisé pour les prélèvements sanguins de routine effectués quotidiennement. Le kit de perfusion de sécurité **VACUETTE®** est utilisé pour le prélèvement de sang et/ou la perfusion brève de liquides intraveineux. L'aiguille à ailettes est pourvue d'une gaine de sécurité destinée à recouvrir l'aiguille immédiatement après le prélèvement de sang/la perfusion, ce qui représente une importante contribution à la prévention des blessures par piqûre d'aiguille. Ce produit doit exclusivement être utilisé par un personnel compétent et dans le respect du présent mode d'emploi.

### Description du produit

Le kit de prélèvement sanguin de sécurité **VACUETTE®** est un produit stérile à usage unique. Il se compose d'une aiguille à ailettes de sécurité fixée à un tuyau flexible à l'extrémité duquel se trouve un raccord Luer. Différentes combinaisons sont disponibles. Le kit de perfusion de sécurité **VACUETTE®** est un produit stérile disponible en emballage individuel qui peut être utilisé avec un système Luer (par exemple Holdex®).

### Kit de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité VACUETTE®

Type	Description
Kit de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité <b>VACUETTE®</b>	Produit stérile, disponible en emballage individuel, peut être utilisé avec un système Luer.
Kit de prélèvement sanguin de sécurité <b>VACUETTE®</b> avec adaptateur Luer	Produit stérile, disponible en emballage individuel, avec adaptateur Luer (par exemple pour l'utilisation avec le porte-tubes standard <b>VACUETTE®</b> ).
Kit de prélèvement sanguin de sécurité <b>VACUETTE®</b> avec adaptateur Luer et porte-tubes	Produit stérile, disponible en emballage individuel, prêt à l'emploi pour le prélèvement de sang.
Kit de prélèvement sanguin de sécurité <b>VACUETTE®</b> avec Holdex® (Ce produit contient du caoutchouc naturel sec.)	

### Instructions de sécurité / précautions

#### Instructions de sécurité

L'observation du mode d'emploi garantit le bon fonctionnement du dispositif.

- Ne tirez pas violemment sur l'aiguille à ailettes et n'activez pas prématurément le mécanisme de sécurité. Vous risqueriez de porter atteinte au bon fonctionnement du dispositif.
- Contrôlez chaque produit avant l'utilisation pour constater d'éventuels dommages. Ne jamais utiliser un produit endommagé !
- Éliminez tout kit de prélèvement sanguin de sécurité **VACUETTE®** utilisé immédiatement dans les containers d'élimination prévus à cet effet.
- Une fois activé, ne relâchez et ne réactivez jamais par la force le mécanisme de sécurité.
- Veillez à ce que vos mains se trouvent derrière l'aiguille à tout moment pendant l'utilisation et l'élimination du produit.

#### Précautions

- Tout échantillon biologique et tout instrument de prélèvement de sang (par exemple lancettes, aiguilles, adaptateurs Luer et kits de prélèvement sanguin) doit être manipulé conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Le VHB, le VHC, le VIH et d'autres maladies infectieuses peuvent être transmis par le contact avec des échantillons biologiques. En cas d'exposition à des échantillons biologiques entraînant un risque d'infection, le recours immédiat à des soins médicaux est recommandé.
- Toute aiguille usagée doit être considérée comme contaminée et doit être jetée dans un conteneur d'élimination pour échantillons biologiques approprié immédiatement après le prélèvement. La réutilisation du produit peut entraîner des infections dangereuses pour la santé, des blessures voire même le décès.
- Pour l'élimination des instruments de prélèvement de sang (par exemple lancettes, aiguilles, adaptateurs Luer et kits de prélèvement sanguin), servez-vous des containers d'élimination prévus à cet effet.
- Portez des gants durant le prélèvement sanguin et durant la manipulation des tubes de prélèvement sanguin afin de minimiser le risque d'exposition au sang.
- Le DEHP, un assouplissant, est contenu dans le canal de fluides du tuyau du kit de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité. La lixiviation du DEHP est possible lorsqu'il est en contact avec des lipides.
- Une attention particulière s'impose lors de l'utilisation sur des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants.
- Dans le cas de patients immobilisés, hémophiles, épileptiques, etc., une attention particulière s'impose lors du prélèvement.
- Ne recouvrez pas le mécanisme de sécurité d'adhésif.
- Lors du retrait ou de l'élimination du produit, veillez à d'éventuelles gouttes de sang ou de médicaments susceptibles d'en couler.


#### Stockage des kits de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité VACUETTE® avant l'utilisation

Température de stockage conseillée : entre 4 et 36° C (entre 40 et 97° F). **REMARQUE :** Évitez le contact direct avec la lumière du soleil. Le dépassement de la température maximale de stockage conseillée peut porter atteinte à la qualité des kits de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité **VACUETTE®**. **REMARQUE :** Le kit de prélèvement sanguin de sécurité **VACUETTE®** contient du polyvinylchloride plastifié au DEHP.


## Application du kit de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité VACUETTE®

- A.** Pour effectuer un prélèvement sanguin, choisissez les tubes appropriés et le kit de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité **VACUETTE®**.
- B.** Sortez le kit de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité **VACUETTE®** de son emballage. Assurez-vous que l'aiguille à ailettes est solidement fixée au mécanisme de sécurité. **REMARQUE :** Si l'emballage est déjà ouvert ou endommagé, veuillez jeter le kit de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité et choisir un produit intact.
- C.** Choisissez le site de ponction. Mettez le garrot et désinfectez le site de ponction. Ne pas palper les veines après avoir désinfecté le site de ponction ! Tenez le kit de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité **VACUETTE®** par les ailettes et retirez le bouchon protecteur de l'aiguille avec précaution.

### D. Prélèvement sanguin / perfusion



**Fig.1**

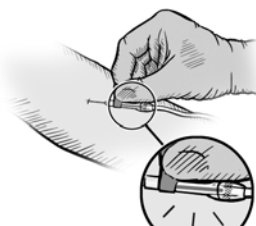

**Fig.2**


Procédez à la ponction veineuse en inclinant le bras du patient vers le bas.

Si la partie transparente derrière l'aiguille se remplit de sang, la veine a été ponctionnée avec succès. Si nécessaire, fixez les ailettes de l'aiguille avec un sparadrap. Commencez alors


- le prélèvement de sang ou
- la perfusion.

**REMARQUE :** Retirez le bouchon du raccord Luer avant de raccorder le tuyau de perfusion.

### E. Activation du mécanisme de sécurité



**Fig.3**

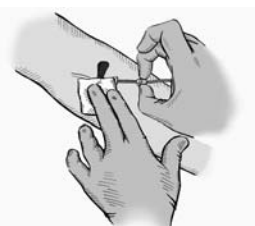

**Fig.4**

Une fois le prélèvement de sang terminé, fixez les ailettes de l'aiguille avec une compresse. Avec l'autre main, déverrouillez le coulisseau de l'aiguille à ailettes en appuyant sur le mécanisme de sécurité des deux côtés.

Glissez le coulisseau du mécanisme de sécurité vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Ce clic indique que le mécanisme de sécurité a été correctement activé.

**REMARQUE :** Veillez à ne pas exercer une pression trop forte sur le site de ponction.

**REMARQUE :** La pression exercée sur le site de ponction doit être maintenue conformément aux prescriptions de sécurité en vigueur sur place.

### F. Elimination




**Fig.5**

Après utilisation, éliminez le kit de prélèvement sanguin/perfusion de sécurité **VACUETTE®** immédiatement dans les containers d'élimination prévus à cet effet conformément aux prescriptions de sécurité en vigueur sur place.

### Activation du mécanisme de sécurité

Une fois le prélèvement de sang terminé, il est recommandé d'activer le mécanisme de sécurité avant de retirer l'aiguille de la veine du patient.

**REMARQUE :** Veillez à ne pas exercer une pression trop forte sur le site de ponction.

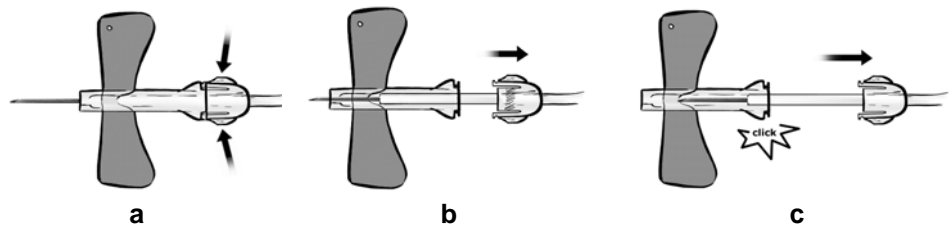

- Déverrouillez le mécanisme de sécurité en appuyant sur les deux côtés.
- Glissez le coulisseau du mécanisme de sécurité vers le bas.
- Un clic indique que le mécanisme de sécurité a été correctement activé.

Vérifiez si le mécanisme de sécurité s'est correctement enclenché et ne bouge plus. L'aiguille doit être entièrement recouverte de la gaine de sécurité.

**Remarque :** Maintenez la pression sur le site de ponction jusqu'à ce que le saignement arrête.

### Informations sur l'étiquette

	Référence d'article
	Numéro de lot : numéro de charge
	Date de péremption : Le produit peut être utilisé jusqu'à la fin du mois indiqué.
	Symbole de « Stérilisation à l'oxyde d'éthylène »
	Symbole de « Produit à utilisation unique »

### Références :

CLSI (Clinical Laboratory Safety Institute)  
H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition



greiner bio-one