

VACUETTE[®] PREMIUM Safety Needle System Tube-Touch
(Sikkerhetskanylesystem med rørtløsning)**Brukerveiledning****Tiltenkt bruk**

VACUETTE[®] PREMIUM Safety Needle System Tube-Touch brukes i rutinemessige venepunksjonsprosedyrer. Kanylesystemet er utformet som en kombinasjon av en integrert multirørskanyle, rørholder og sikkerhetsdeksel, og er ment for fylling av flere rør ved én enkelt venepunksjon. Sikkerhetsdekselet aktiveres automatisk og utløses ved innsetting av det første prøverøret og det dekker kanylen umiddelbart etter at kanylen er trukket ut av venen. Produktet skal bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til disse instruksjonene.

Produktbeskrivelse

VACUETTE[®] PREMIUM Safety Needle System Tube-Touch er et engangs, sterilt og giftfritt kanylesystem utformet med en integrert multirørskanyle og sikkerhetsdeksel for å beskytte mot stikkskade ved venepunksjon. Dette produktet har ingen komponenter av tørr naturgummi.

Håndtering av VACUETTE[®] PREMIUM Safety Needle System Tube-Touch

1. Velg passende rør og VACUETTE[®] PREMIUM Safety Needle System Tube-Touch for prøvetaking av veneblod.
2. Fjern den beskyttende forseglingen fra bakenden på VACUETTE[®] PREMIUM Safety Needle System Tube-Touch.
MERK: Væskebanen er steril og ikke-pyrogen når både beskyttende forsegling og forseglingsetiketten er intakt. Dersom forseglingen eller etiketten er åpnet eller skadet, må produktet kastes og et nytt velges.
3. Sett på og stram stasebåndet og lokaliser en egnet åre for venepunksjonen. Desinfiser punksjonsstedet med et egnet antiseptisk middel. IKKE PALPER punksjonsstedet etter desinfisering. Fjern forsiktig beskyttelseshetten over kanylen på VACUETTE[®] PREMIUM Safety Needle System Tube-Touch.
4. Utfør venepunksjonen med pasientens arm rettet nedover.
5. Trykk det første prøvetakingsrøret helt inn i VACUETTE[®] PREMIUM Safety Needle System Tube-Touch.
MERK: Sikkerhetsdekselet aktiveres ved å føre prøvetakingsrøret inn i VACUETTE[®] PREMIUM Safety Needle System Tube-Touch. Prøverøret bør holdes på plass mens det fylles.
6. Når gummien i korken på prøverøret penetreres, utløses sikkerhetsdekselet som skyves fremover, slik at det hviler lett mot pasientens hud inntil prøvetakingen er fullført. Prøvetakeren kan foreta en eventuell justering av penetrasjonsdybden selv om sikkerhetsdekselet er utløst. Sikkerhetsdekselet har et visuelt merke som gjør at prøvetakeren kan se hvor dypt kanylen ligger.
7. Når prøvetakingen er ferdig, trekkes kanylen ut av venen. Sikkerhetsdekselet vil automatisk skyves framover slik at det dekker kanylen fullstendig. Kontroller visuelt at kanylen er fullstendig dekket.
8. Kast VACUETTE[®] PREMIUM Safety Needle System Tube-Touch i godkjent risikoavfallsbeholder umiddelbart.

Forholdsregler

Produktet vil yte som tiltenkt når det brukes i samsvar med instruksjonene. Unngå å utløse sikkerhetsdekselet utilsiktet eller å dra i sikkerhetsdekselet med makt, da slike handlinger kan skade produktets integritet.


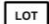

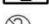
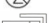


- Kontroller forseglingen på hver produktenhet før bruk. Ikke bruk produktet dersom forseglingen er brutt.
- En brukt kanyle skal betraktes som kontaminert, og den skal kastes i en godkjent risikoavfallsbeholder umiddelbart etter bruk.
- Ikke fjern eller re-aktiver sikkerhetsdekselet med makt etter at det er aktivert.
- Hold alltid hendene bak kanylen, både ved bruk og avhending.
- Ikke sett beskyttelseshetten på kanylen igjen.

Forsiktighetsregler

- Håndter alle biologiske materialer og skarpe gjenstander for blodprøvetaking i henhold til lokale prosedyrer og retningslinjer.
- Oppsøk lege ved eksponering med biologiske prøver (for eksempel ved stikkskade), ettersom de kan overføre HIV (AIDS), hepatittvirus eller andre blodbårne patogener.
- Kast alle skarpe gjenstander for blodprøvetaking i godkjente risikoavfallsbeholdere.
- Hansker bør brukes under venepunksjonen for å redusere eksponeringsfaren.

Oppbevaring av VACUETTE[®] PREMIUM Safety Needle System Tube-Touch før bruk

Unngå eksponering for direkte sollys.

| Etikettinformasjon | Referanse: |
|--|--|
|  Produktnummer | CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute) H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-6th Edition BS EN 980:2008 |
|  Batchnummer/Lotnummer | |
|  Utløpsdato: Produktet kan brukes til slutten av angitt måned | |
|  Symbol for "kun engangsbruk" | |
|  Symbol for "steril væskebane" | |
|  Symbol for "se i bruksanvisningen" | |
|  Produsent | |



Greiner Bio-One GmbH,
Bad Haller Straße 32, 4550 Kremsmünster, Østerrike
Tlf: +43 75 83 67 91, Faks: +43 75 83 63 18
www.gbo.com/office@at.gbo.com